




Visit_001ART009-DE

BE1491

Visit Babyruf-Sender

HMV 13.99.04.0026

Tasten und Verbindungen

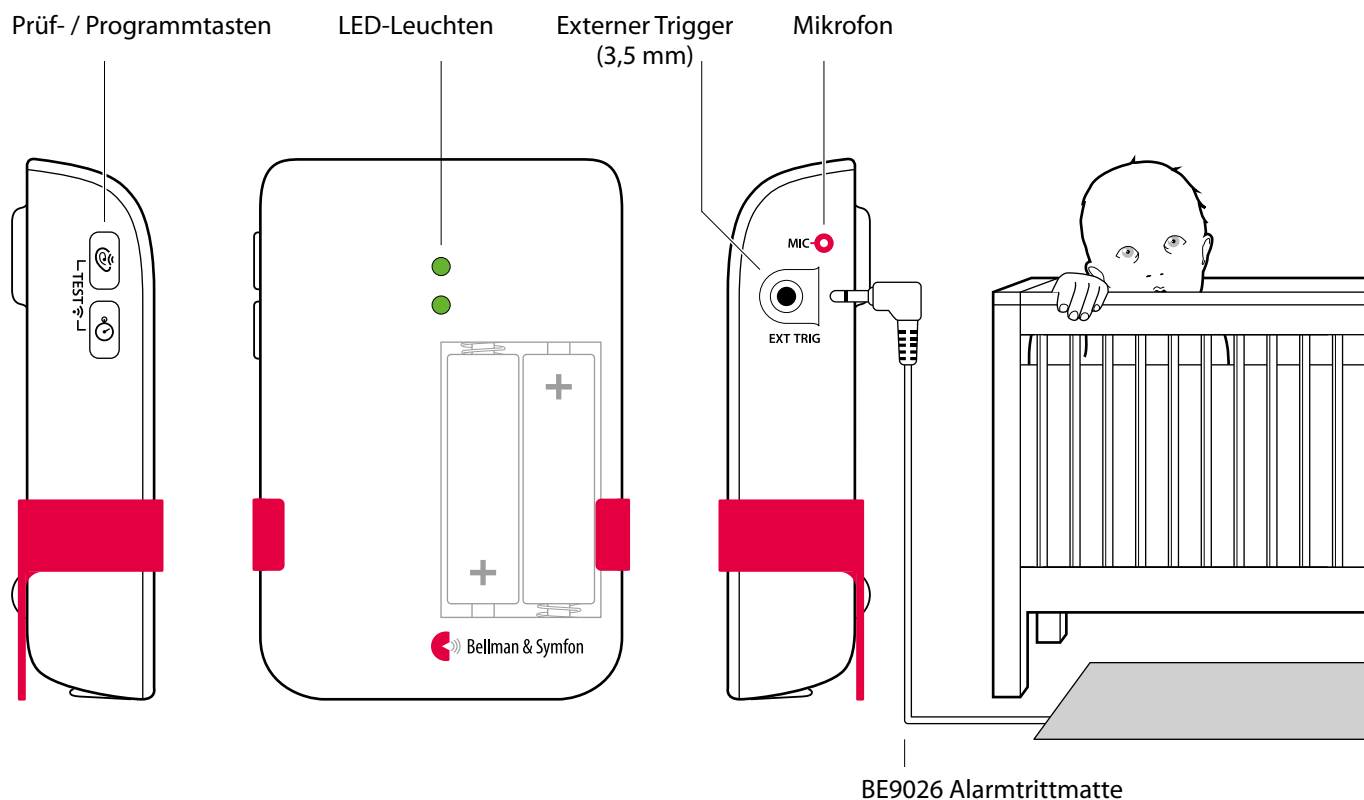

⚠ Stellen Sie stets sicher, dass sich der Babyruf-Sender außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
Stellen Sie den Babyruf-Sender niemals im Bett oder Laufgitter des Kindes auf.

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1491 Visit Babyruf-Sender
- 2 × Alkaline-Batterien
- Standfuß
- Schraube und Wanddübel

Strom und Batterie

- Batteriestrom
2 × Lithium- oder Alkaline-Batterien
(1,5 V; AA)
- Stromverbrauch
Aktiv < 70 mA
Ruhezustand < 400 µA
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterien ca. 6 Monate
Lithium-Batterien ca. 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 100 mm
- Breite: 65 mm
- Tiefe: 27 mm
- Gewicht: 118 g, inkl. Batterien

Aktivierung

- Über das interne Mikrofon und die Prüftasten
- Zubehör Alarmtrittmatte

Einstellungen

- Empfindlichkeit:
65 dB, 75 dB, 85 dB
- Verzögerung: 30 s, 10 s, 1 s

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit:
15% bis 90% (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite

- Frequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: 50 - 250 m abhängig von den Eigenschaften des Gebäudes und der Kombination von Sendern und Empfängern.

Zubehör

- BE9026 Alarmtrittmatte
Benachrichtigt Sie, wenn Ihr Baby sein Bett verlässt



Visit_001ART009-DE


BE1491

Visit Babyruf-Sender

HMV 13.99.04.0026

Inbetriebnahme des Babyruf-Senders

- 1 Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um das Gerät zu starten.
(Später können Sie auch die Prüftasten für drei Sekunden gedrückt halten, um es ein- oder auszuschalten).
- 2 Platzieren Sie den Babyruf-Sender auf dem Nachttisch oder befestigen Sie ihn mit beiliegender Schraube und Dübel an der Wand. Der empfohlene Abstand beträgt 0,5 bis 2,0 Meter (stets außerhalb der Reichweite des Kindes).

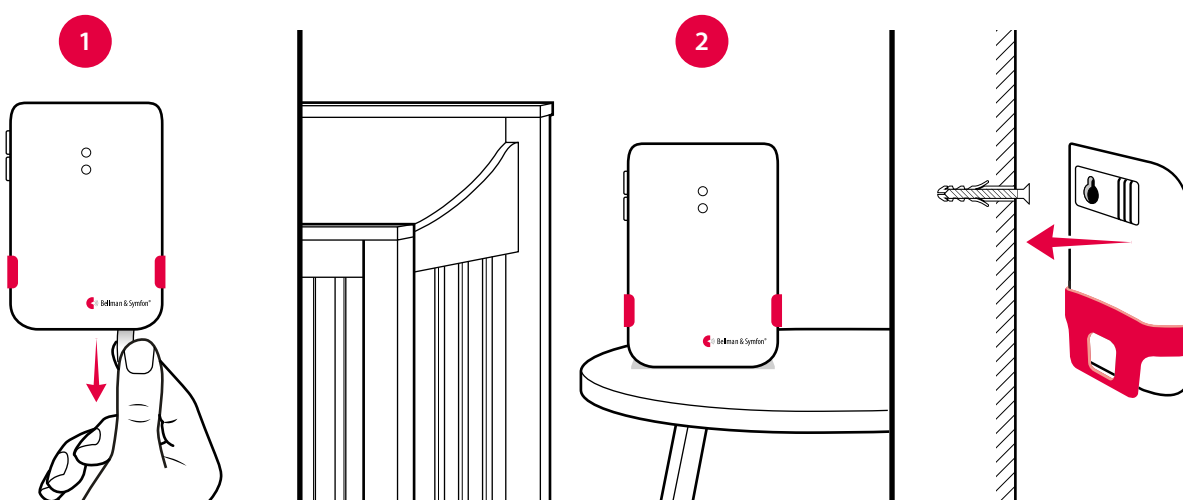


Prüfen der Verbindung

Mit der Prüftaste

- 1 Drücken Sie am Babyruf-Sender gleichzeitig beide Prüftasten. Die obere LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein Funksignal übertragen wird.
- 2 Die orangefarbene Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.


Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in folgender Tabelle.

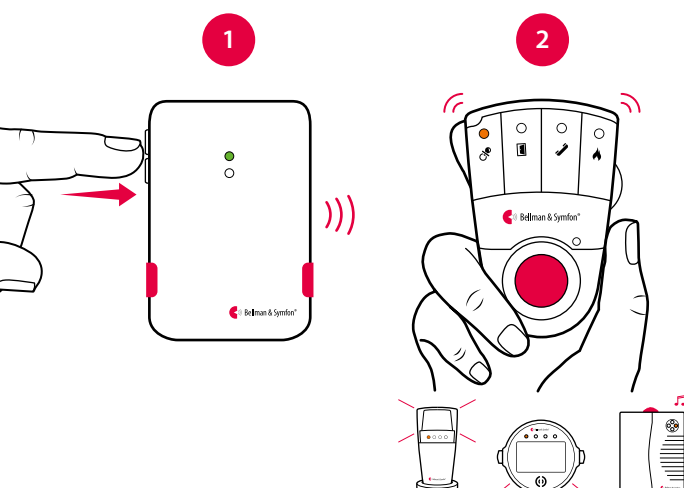

Mit der Stimme

- 1 Stellen Sie sich neben den Babyruf-Sender und machen Sie ein paar Geräusche. Die obere LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass das Geräusch bzw. Schall erkannt wird.
- 2 Die orangefarbene Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Funksignal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in folgender Tabelle.

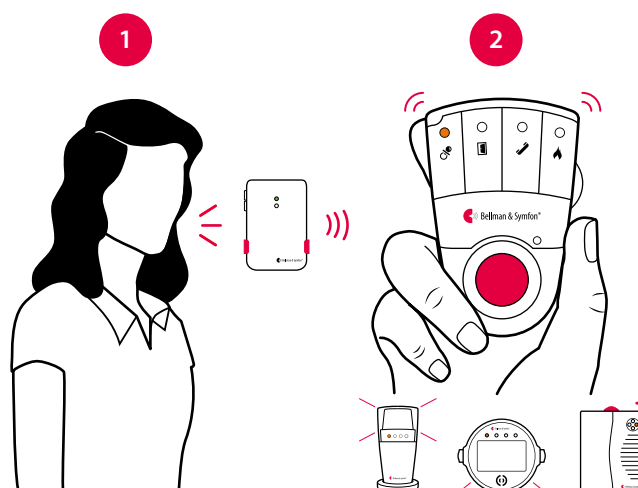



Visit_001ART009-DE

BE1491

Visit Babyruf-Sender

HMV 13.99.04.0026

Einstellungen anpassen

Die Tasten für Empfindlichkeit und Verzögerung befinden sich auf der linken Seite des Babyruf-Senders. Wenn Sie eine Taste drücken, wird anhand der Farbe der zugehörigen LED die aktuelle Einstellung angezeigt. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Einstellung zu ändern.


- Der Babyruf-Sender wird trotz schreienden Babys nicht aktiviert: Empfindlichkeit erhöhen.
- Der Babyruf-Sender wird bereits bei leisen Geräuschen aktiviert: Empfindlichkeit verringern.
- Der Babyruf-Sender wird zu früh/spät aktiviert: Verzögerung entsprechend anpassen.

Empfindlichkeitseinstellungen

	65 dB	Rot
	75 dB	Orange
	85 dB	Grün

Verzögerungseinstellungen

	30 s	Rot
	10 s	Orange
	1 s	Grün

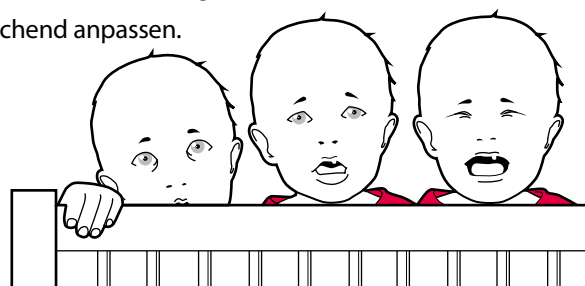

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn der Babyruf-Sender von der Stimme des Babys oder der Alarmtrittmatte aktiviert wird, passiert Folgendes:

- 1 Die LED des Babyruf-Senders leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass es an den Empfänger sendet.
- 2 Die Visit-LED am Empfänger leuchtet orangefarben auf und der Empfänger beginnt, in einer bestimmten Geschwindigkeit Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale auszusenden. Dies wird Signalmuster genannt. Der Babyruf-Sender und die Alarmtrittmatte geben das Signalmuster vor. Standardmäßig ist es dieses Muster:

Babyruf-Sender		Empfänger-Signalmuster			
Quelle	LED	LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
■ Stimme des Babys	Grün, oben	Oranges Leuchten	Babymelodie	Schnell	Ja
■ Alarmtrittmatte	Grün, unten	Grünes Leuchten	1 × Türgong, tief	Langsam	Ja

Signalmuster ändern

Wenn Sie mehr als ein Kind haben, können Sie für jeden Babyruf-Sender ein eigenes Signalmuster der Visit-LED einstellen. Dazu öffnen Sie einfach die vordere Abdeckung und stellen einen beliebigen Signalschalter auf die obere Position (Ein). Vergewissern Sie sich, dass alle anderen Schalter in der unteren Position (Aus) stehen.



Babyruf-Sender			Empfänger-Signalmuster			
Schalter	Quelle		LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
	Babyruf-Sender	1	Oranges Leuchten	Babymelodie	Schnell	Ja
	Alarmtrittmatte	1	Grünes Leuchten	Babymelodie	Schnell	Ja
	Babyruf-Sender	2	2 × oranges Blinken	Babymelodie	Schnell	Ja
	Alarmtrittmatte	2	2 × grünes Blinken	Babymelodie	Schnell	Ja
	Babyruf-Sender	3	3 × oranges Blinken	Babymelodie	Schnell	Ja
	Alarmtrittmatte	3	3 × oranges Blinken	Babymelodie	Schnell	Ja
	Babyruf-Sender	4	Oranges Blinken	Babymelodie	Schnell	Ja
	Alarmtrittmatte	4	Oranges Blinken	Babymelodie	Schnell	Ja



Visit_001ART009-DE

Visit Babyruf-Sender

BE1491

HMV 13.99.04.0026



Frequenzband ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten das Frequenzband ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich unter der Abdeckung des Babyruf-Senders.

So ändern Sie das Frequenzband:

- 1 Entfernen Sie vorsichtig den Tischständer und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Babyruf-Senders. Stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (Ein), um das Frequenzband zu ändern.
- 2 Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Babyruf-Sender gleichzeitig beide Prüftasten, um das neue Frequenzband zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass das Frequenzband geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dasselbe Frequenzband eingestellt sein.

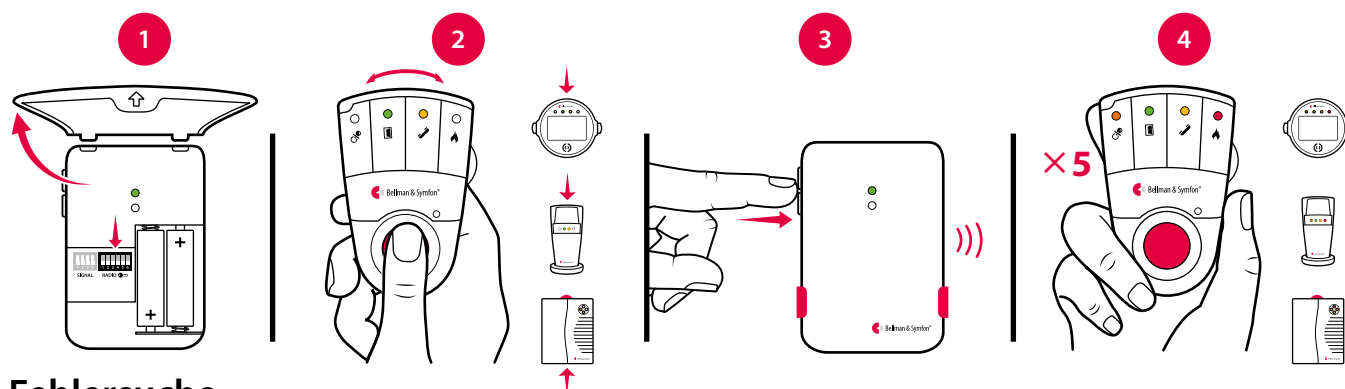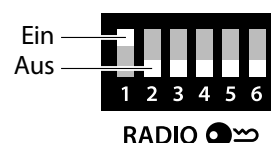

Fehlersuche

Problem	Lösung
Die LEDs blinken einmal pro Minute orangefarben.	■ Ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6).
Die Babyruf-Sender-LED leuchtet grün auf, aber der Empfänger wird nicht aktiviert.	■ Überprüfen Sie die Batterien von Babyruf-Sender und Empfänger sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ■ Verringern Sie den Abstand zwischen Babyruf-Sender und Empfänger, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ■ Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf dasselbe Frequenzband eingestellt sind, siehe Frequenzband ändern.
Die Babyruf-Sender-LED leuchtet nicht auf, obwohl das Baby schreit.	■ Verringern Sie den Abstand zwischen Baby und Babyruf-Sender oder erhöhen Sie die Mikrofon-Empfindlichkeit, siehe Einstellungen anpassen. Hinweis: Stellen Sie stets sicher, dass sich der Babyruf-Sender außerhalb der Reichweite von Kindern befindet. Stellen Sie den Babyruf-Sender niemals im Bett oder Laufgitter des Kindes auf.
Der Babyruf-Sender wird bereits bei leisen Geräuschen aktiviert.	■ Verringern Sie die Empfindlichkeit oder vergrößern Sie den Abstand des Babyruf-Senders zum Kinderbett, siehe Einstellungen anpassen.
Der Babyruf-Sender wird zu früh aktiviert.	■ Erhöhen Sie die Verzögerung. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen anpassen.
Der Babyruf-Sender wird zu spät aktiviert.	■ Verringern Sie die Verzögerung. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen anpassen.
Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	■ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten das Frequenzband, siehe Frequenzband ändern.