


Visit mobiltelefonsändare



Knappar och anslutningar

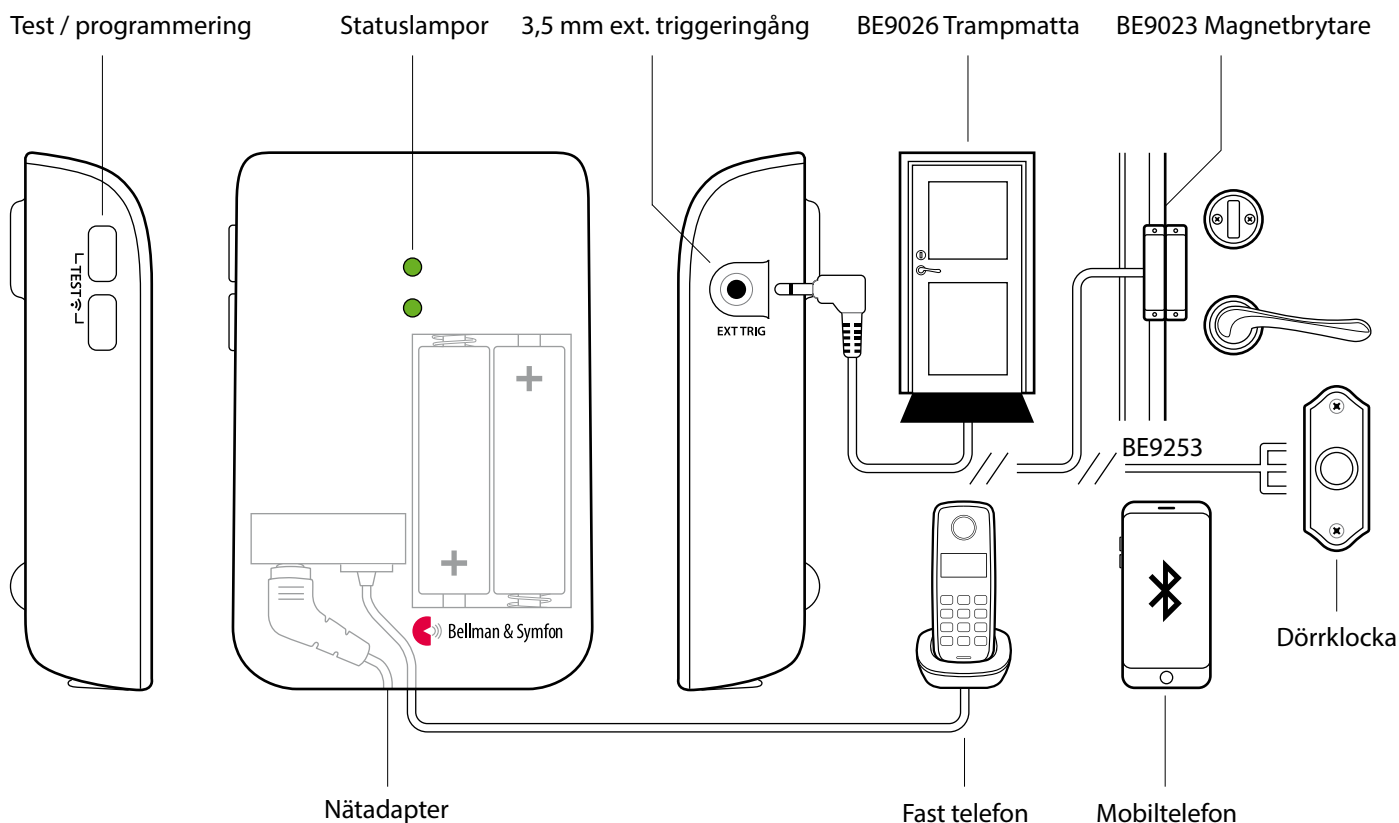

Teknisk information

I förpackningen

- BE1432 Visit mobiltelefonsändare
- Nätadapter och strömkabel
- 2×1.5V AA Alkaliska batterier
- Förmonterad telefonkabel
- Mellanpropp
- Skruv och plugg

Kompatibilitet

- iOS11 eller senare
Android 4.4 eller senare
- iPhone 6S eller senare
Moderna Androidtelefoner

Ström och batteri

- Strömförsörjning: 5 V DC / 1000 mA
- Batterier: 2×1.5 V AA, Alkaliska

Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g, inklusive batterier

Aktivering

- Via mobiltelefon (över Bluetooth)
- Via fast telefon
- Via en trampmatta / magnetbrytare
- Via en ansluten dörrklocka
- Via testknapparna

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Temperatur: 0 – 35 °C
Relativ luftfuktighet: 15% – 90%

Tillbehör

- BE9023 Magnetbrytare
- BE9026 Trampmatta
- BE9253 Extern triggerkabel 3,5 mm

Anslutningar

- RJ11 analog telefoningång
- 3,5 mm extern triggeringång
- Uttag för nätadapter
- Bluetooth 5.0

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.30 MHz
- Radioräckvidd: Upp till 250 m
- Bluetoothfrekvens: 2402 – 2480 MHz
- Bluetoothäckvidd: Upp till 50 m


Visit mobiltelefonsändare



Installera appen

1 Slå på Bluetooth®

Svep för att öppna Kontrollcenter / Snabbinställningar och tryck på Bluetooth-ikonen.

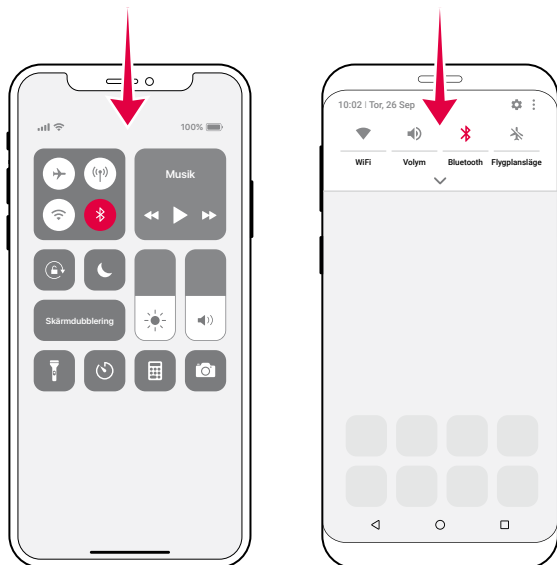

2 Installera Visitappen



Ladda ner **Bellman Visit**-appen från App Store® eller Google Play™ och följ anvisningarna för att komma igång.



Installera sändaren

3 Montera

Ta bort skyddsfilm från kardborren på sändarens baksida och fäst den på väggen. Du kan istället använda medföljande skruv och plugg.

4 Starta

Dra bort batterilappen för att starta sändaren. Statuslamporna lyser i grönt för att visa att den är på.

5 Anslut



Anslut USB-kontakten i nätadaptern. Snäpp fast el-kontakten och koppla in adaptern i vägguttaget. Om du har fast telefon ansluter du den med hjälp av medföljande mellanpropp enligt bilden.

6 Testa anslutningen till mobilen

Be någon ringa till din mobiltelefon. Den gula lampan på Visitmottagaren blinkar gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

7 Testa anslutningen till den fasta telefonen

Ring till din fasta telefon. Den gula lampan på Visitmottagaren lyser gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

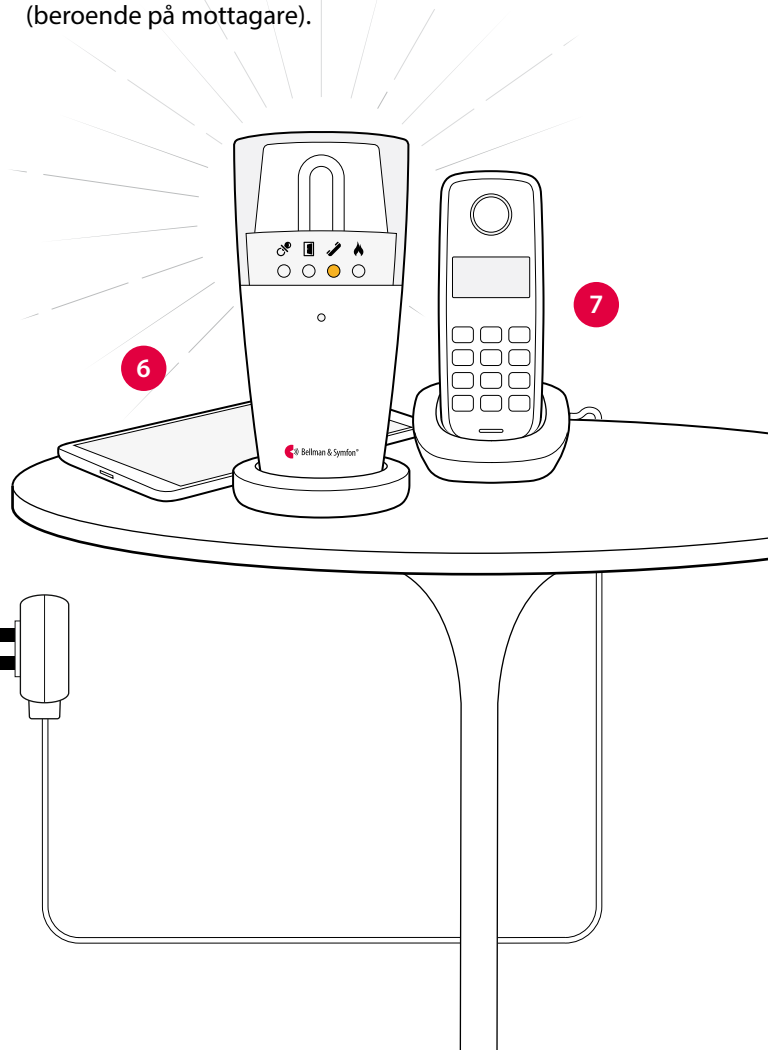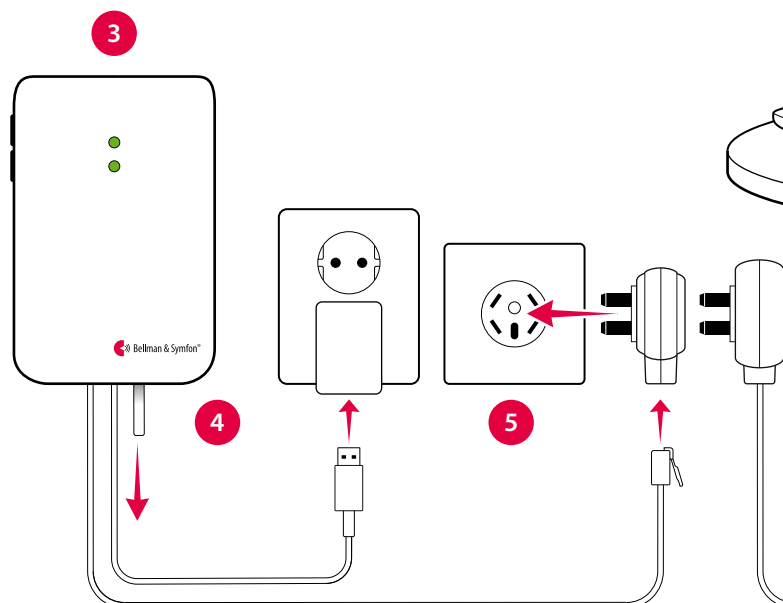

Visit mobiltelefonsändare

Använda appen

Det finns stunder på dagen då man inte vill bli störd av en massa signaler. Genom att välja en **Aktivitet** i appen kan du enkelt bestämma vad som skall resultera i en Visit-notifiering.



God morgon

Visit notifierar för både samtal och meddelanden under denna aktivitet. Välj den på dagen när du inte vill missa något.



Godnatt

Alla Visitnotifieringar är avstängda under denna aktivitet. Välj den när du går och lägger dig, så att du kan sova ostört.




Filmkväll

Visit notifierar endast för samtal under aktiviteten. Välj den när du tittar på TV, så att du slipper bli störd av Visit-signaler mitt i ditt favoritprogram.



Middagsdags

Visit notifierar endast för meddelanden under aktiviteten. Välj den t.ex. vid middagen, så att du inte behöver tala i telefon med mat i munnen.

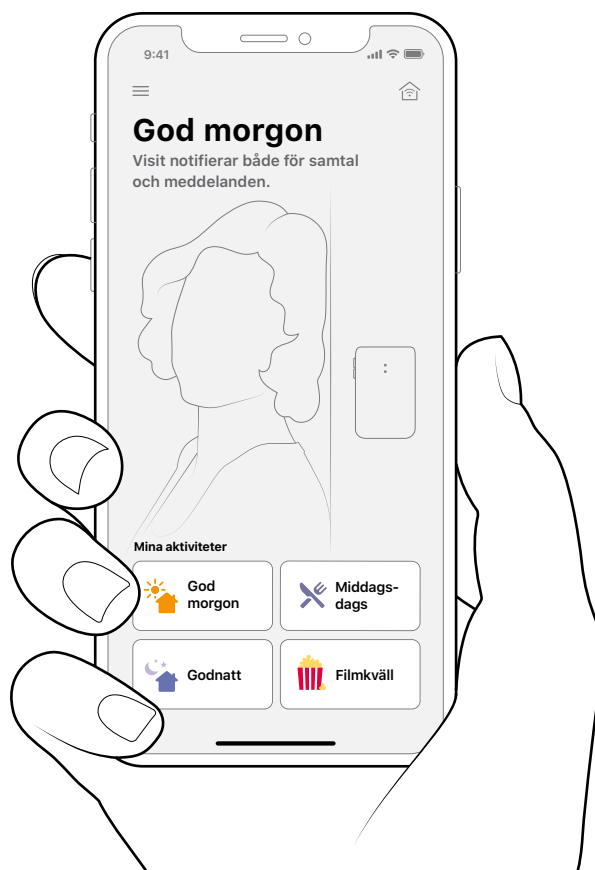

Förinställt signalmönster

När mobiltelefonsändaren aktiveras av ett inkommande samtal, meddelande eller ett anslutet tillbehör händer följande:

- 1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.
- 2 En Visitlampa på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt tabellen i avsnittet **Byta signalmönster** för BE1431.

Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter, se avsnittet **Byta radionyckel** för BE1431.

Sändare

Signalmönster, mottagare

Källa	Statuslampan	Visitlampa	Ljud	Vibration	Blixt
■ Fast telefon	Grön, övre	Lyser gult	1 × ringsignal, mörk ton	Mellan ■□□□	Ja
■ Mobiltelefon	Grön, övre	Blinkar gult	2 × ringsignal, ljus ton	Mellan ■□□□	Ja
■ Tillbehör	Grön, undre	Lyser grönt	1 × dörrsignal, mörk ton	Långsam ■□□□	Ja