


Willkommen!

Sie benötigen

- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS 11 / Android 6 oder höher
- Einen USB-Netzadapter


Lieferumfang

- 1 Ladekabel
- 2 Vibrationskissen

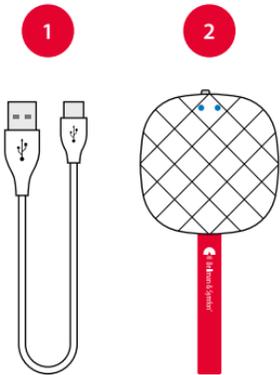

Farben der LEDs

- Weiß: Alarm aktiviert oder Vibio kommuniziert mit Ihrem Smartphone
- Blau: Vibio ist bereit zur Verbindung (Pairing)
- Grün: Vibio wird geladen
- Gelb: Anruf oder Nachricht geht ein
- Rot: Akkuladestand niedrig

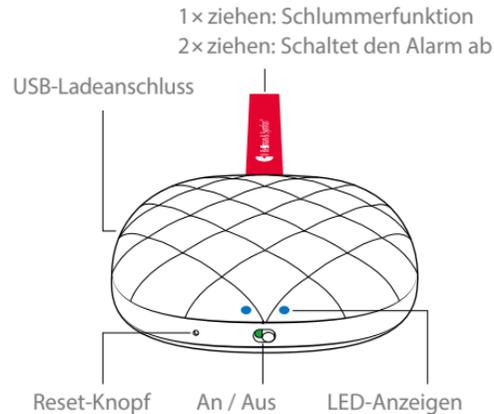

Vibio vorbereiten

1 Laden Sie das Vibio

Schließen Sie das Ladekabel an Ihr Vibio an und stecken Sie den Stecker in einen USB-Anschluss zum aufladen.


2 Schalten Sie das Vibio ein

Schieben Sie den Ein- / Ausschalter nach rechts und behalten Sie das Vibio in der Nähe Ihres Smartphones.

3 App Installation



Laden Sie die **Vibio** App aus dem App Store® oder von Google Play™ herunter und folgen Sie einfach den Anweisungen.

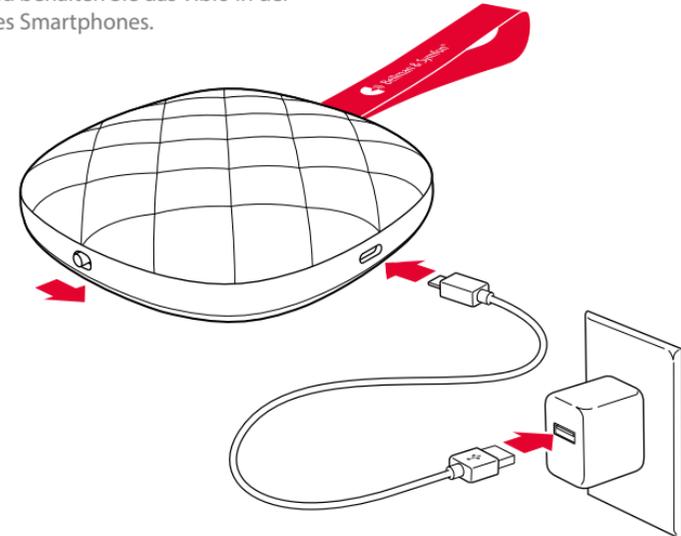

App benutzen

Alarmer verwalten

-  **Hinzufügen.** Tippen Sie auf die Plus-Taste, um einen neuen Alarm zu erstellen.
-  **Bearbeiten.** Tippen Sie auf das Stift-Symbol, um einen Alarm zu bearbeiten.
-  **Löschen.** Tippen Sie auf die Minus-Schaltfläche, um einen Alarm zu löschen.
-  **EIN / AUS.** Tippen Sie auf die Schaltfläche EIN oder AUS, um einen Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Vibio Status

-  **Verbindung.** Das Vibio-Symbol zeigt den Verbindungsstatus an.
-  **Akku.** Das Akku-Symbol zeigt den aktuellen Akkuladestand.

Weiteres

-  **Hilfe.** Tippen Sie auf Menü > Hilfe, um mehr über die App zu erfahren.



Fehlerbehebung

Wenn	Probieren Sie folgendes
Die LEDs rot pulsieren	Der Akku ist fast leer. Laden Sie das Vibio mit dem mitgelieferten Ladekabel
Die LEDs nicht leuchten	Der Akku ist leer. Laden Sie das Vibio etwa 1,5 Stunden lang auf.
Das Vibio sich nicht mit dem Smartphone verbindet	Überprüfen Sie zunächst die Bluetooth-Verbindung auf der Startseite der App. Wenn das Vibio-Symbol rot und durchgestrichen ist, versuchen Sie Folgendes: <ol style="list-style-type: none">Verringern Sie die Distanz. Bringen Sie Ihr Handy näher an das Vibio.Schalten Sie Bluetooth aus und ein. Wischen Sie, um das Kontrollzentrum zu öffnen / Klicken Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf das Schnelleinstellungsfeld und anschließend auf das Bluetooth-Symbol. Wenn es immer noch nicht funktioniert, müssen Sie das Vibio zurücksetzen und erneut mit der App verbinden. Versuchen Sie Folgendes:<ol style="list-style-type: none">Deinstallieren Sie die App. Laden Sie die App erneut und installieren Sie diese.Trennen Sie das Vibio. Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth. Tippen Sie auf ⓘ / ⚙️ und stellen Sie dieses Gerät auf "vergessen", um "Vibio" zu trennen. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.Setzen Sie das Vibio zurück. Ziehen Sie an der Zuglasche und halten Sie sie fest, bis die LED zu flackern beginnt. Lassen Sie los und ziehen Sie erneut, bis die LEDs blau zu pulsieren beginnen.Richten Sie das Vibio ein. Starten Sie die Vibio-App erneut und folgen Sie den Anweisungen.

Verwendungszweck
Vibrationsalarmgerät für hochgradig Hörgeminderte zur Signalisierung von Weckalarmen, Smartphone Anrufen und SMS in Verbindung mit einer App.

Energie und Akku
Akkuleistung: 1 x 3.7 V AA Lithium-Ionen Leistungsaufnahme: Aktiv mit starker Vibration: < 1000 mA, Leerlauf: < 100 µA Betriebszeit: Bis zu 60 Tage pro Ladung Ladezeit: Bis zu 1,5 Stunden bei 500 mA Ladestrom: Bis zu 500 mA, 5 V DC

Kabel und Anschlüsse
Ladekabellänge: 1 m
Kontakte: USB Typ A auf USB Micro-B

Maße und Gewicht
Größe: 27 x 94 x 94 mm, Gewicht: 153 g
Frequenz und Reichweite
Konnektivität: Bluetooth
Bluetooth-Frequenz: 2402 – 2480 MHz
Ausgangsleistung: Max 2.5mW (4dBm)
Reichweite: Bis zu 30 m, 33 m, freies Feld.

Wartung und Reinigung
Wartungsfrei. Mit einem trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, Sprays, Alkohol oder Scheuermittel.

Kompatibilität
iOS 11 / Android 7 und höher,
iPhone 6s und neuer /
Moderne Android-Geräte

Wiederverwendbar
Ohne weitere Maßnahmen für den Wiedereinsatz geeignet. Anleitung für Sehbehinderte & Blinde stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Sicherheits- und Garantiebedingungen
Erhalten Sie von Ihrem Händler.

Bellman & Symfon Deutschland GmbH
Mehlbachstr. 6, 21339 Lüneburg
E-Mail info@bellman.de
Technischer Support
0800 74 333 38 / info@bellman.de

© and TM 2021, Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten.