

Bellman Visit Charger

Inbetriebnahme!

1. Das Ladegerät auf einen Tisch stellen oder an der Wand aufhängen. Wenn das Ladegerät auf dem Tisch steht, sind die Stützen an der Hinterseite des Ladegeräts anzubringen.
2. Das Netzgerät an eine Steckdose anschließen und, wenn gewünscht, ein oder zwei Bettvibratoren anschließen.
3. Der Taschenvibrator Bellman Visit in das Ladegerät stellen. Nach dem Aufladen (siehe Abschnitt "Ladestromleuchte") ist der Taschenvibrator betriebsbereit.

Ladestromleuchte

Die Ladestromleuchte ist grün und an der Vorderseite des Ladegeräts angebracht. Sie wird eingeschaltet, wenn der Taschenvibrator in das Ladegerät gestellt wird. Die Leuchte zeigt an, dass der Akkumulator aufgeladen wird. Wenn das Aufladen beendet ist, erlischt die Ladestromleuchte. Die Ladestromleuchte ist gelöscht, wenn der Taschenvibrator nicht in das Ladegerät gestellt ist.

Sicherungsakkumulator

Der Sicherungsakkumulator ist zusätzlich im Ladegerät eingebaut und wird automatisch aufgeladen, wenn das Netzgerät des Ladegeräts an eine Steckdose angeschlossen ist. Bei einem eventuellen Netzstromausfall versorgt der Sicherungsakkumulator die Bettvibratoren mit Strom, damit sie jeden Alarm ungestört empfangen können.

Bettvibratoren

Ein oder zwei Bettvibratoren können an die Vibrator Ausgänge A und B des Ladegeräts angeschlossen werden. Wenn der Taschenvibrator im Ladegerät steht, vibriert er nicht, statt dessen werden die Bettvibratoren auf die gleiche Weise vibrieren, wie der Taschenvibrator. Die Leuchtdioden des Taschenvibrators leuchten wie gewöhnlich auf.

Störungssuche

Eine Störung ist nicht immer ernst. Befolgen Sie den nachstehenden Störungssuchplan, bevor Sie den Service verständigen.

| Symptom | Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Taschenvibrator wird nicht aufgeladen, wenn er im Ladegerät steht. | Prüfen Sie, dass der Taschenvibrator richtig im Ladegerät steht. Wenn der Taschenvibrator in das Ladegerät gestellt wird, leuchtet die Ladestromleuchte des Ladegeräts auf. |
| Die Bettvibratoren vibrieren nicht bei Alarm. | Prüfen Sie, dass die Bettvibratoren richtig an das Ladegerät angeschlossen sind und dass der Taschenvibrator richtig im Ladegerät steht. |

Produktbeschreibung

- 1) Vibratorausgang A
- 2) Ladkontakte
- 3) Ladestromleuchte
- 4) Vibratorausgang B
- 5) Stütze