

Trampmatta

BE9026-P02



Håller koll på alla som kommer och går.

Trampmattan från Bellman & Symfon är speciellt utvald för Visitsystemets lösningar för smarta hem. Placera trampmattan vid ytterdörren eller nedanför sängen för att få reda på när någon rör sig i ditt hem.

Trampmattan är utformad för att klara dagligt slitage, helt dammtät och i princip underhållsfri. Anslut den till en Visit telefonsändare för att få reda på när någon kommer in i ett rum eller lämnar sängen.

Användning

Trampmattan är mycket känslig och kan användas för att upptäcka, exempelvis, när:

- Någon går in eller ut ur ett rum.
- Någon kliver ur sängen.
- En kund kommer in i affären.

Du kan också använda den för att säkra upp barnrummet. Anslut trampmattan till Visit babymonitor för att få reda på när barnet kravlar ur spjäsängen.



Egenskaper

Dammtät

Uppfyller IP66 skyddsklass

Robust och tålig

Kan användas i -15 till 65 °C

Kompatibel med Visit


Fungerar med Visitsystemet

MD


CE-märkt medicinsk enhet
enligt EU MDR 2017/745



Teknisk information

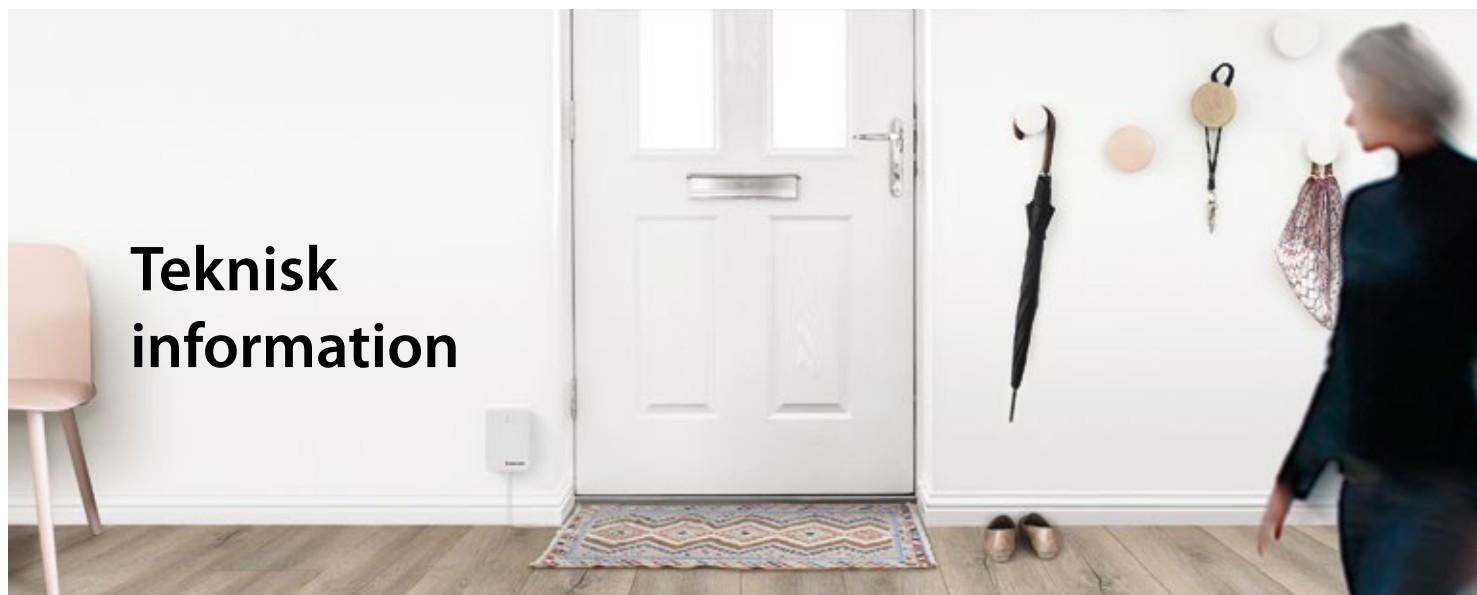


Så här kommer du igång

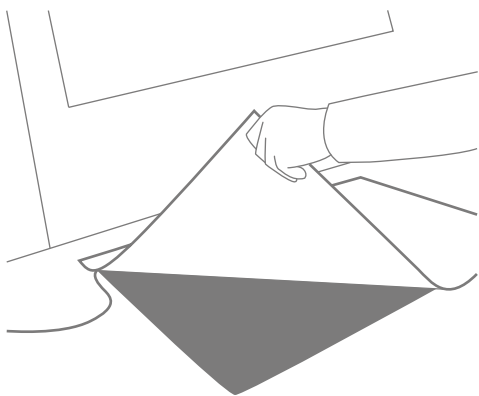


1. Placera mattan på en slät, plan yta och fäst sladdarna vid väggen eller listen.

Täck trappmattan med till exempel en dörmatta för att skydda den från slitage och undvika halkrisk.

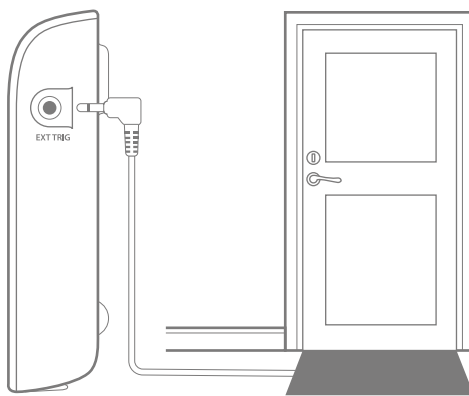

2. Anslut mattan i det externa trigger-uttaget på din Visitsändare.

Placera mattan så nära sändaren att kabeln kan sättas fast ordentligt i väggen eller listen och du inte riskerar att snubbla.

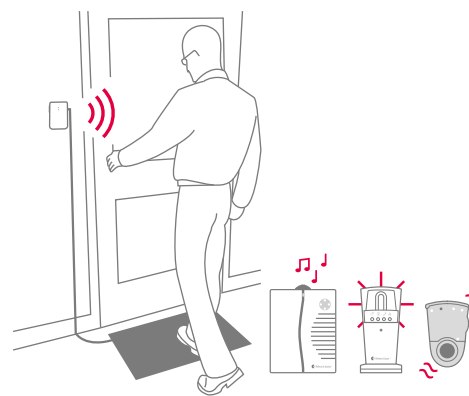


3. Trampa på mattan för att prova installationen. När kontaktmattan känner av ett tryck, aktiverar den sändaren som signalerar din Visitmottagare. Mottagaren talar om att något hänt med ljud, blixtrar eller vibrationer (beroende på mottagare).

Mått och vikt

Höjd: **395 mm**
Bredd: **540 mm**
Djup: **4.6 mm**
Vikt: **290 g**
Kabel: **200 cm**



Schematisk bild

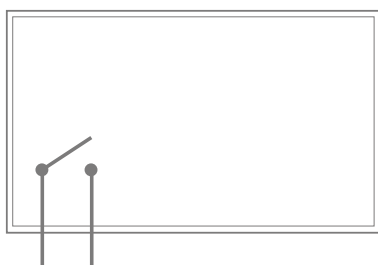

Funktioner

- Kontakt: N/O normalt öppen
- Kontaktmotstånd: Normalt $<100 \Omega$ (beroende på tryck)
- Normalt tryck: $>5 \text{ kg}$ över en yta på 50 mm i diameter

Omgivning

- Arbetstemperatur: -15 till 65°C
- Påverkan: Dammtät och uppfyller IP65 skyddsklass (Ej vattentät)

Maxklassificering

- Kontaktspänning: Max 10 VA
- Kopplingsspänning: Max 25 VDC
- Kopplingsström: Max 0,25 A DC resistiv
- Högsta Strömförbrukning: Max 0,25 A DC resistiv

Varningar

- Kontaktmattan får inte användas i säkerhetsrelaterade tillämpningar.
- Det är viktigt att täcka mattan för att undvika halkrisk och hårt slitage.
- Vidta en extra aktsamhet för att undvika direkt tryck på trappmattans anslutningar eller kraftiga ryck i anslutna kablar.

Godkännanden



Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE9026-P02_001DSH1.0-SE

bellman.com