


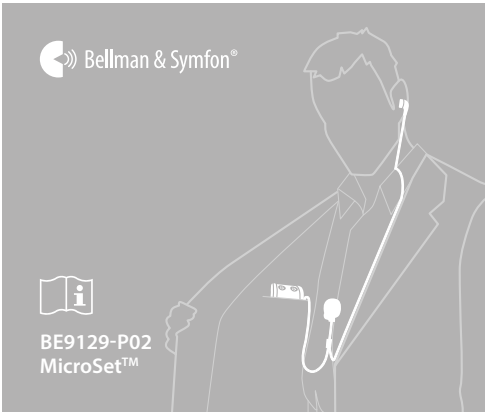

SE Produktinformation

Läs detta först

I den här broschyren får du information om hur du använder och underhåller ditt nya Microset. Läs igenom den här broschyren noggrant, inklusive avsnittet **Varningar**. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din audionom.

Om BE9124-P02 Microset

Avsedd användning

Den avsedda användningen av ljudproduktfamiljen är att förstärka volymen och förbättra taluppfattbarheten under samtal och TV-tittande. Den kan också användas med andra ljudkällor.

Avsedd användargrupp

Den avsedda användargruppen består av personer i alla åldrar med mild till grav hörselnedsättning som behöver ljudförstärkning i olika situationer.

Avsedd användare

Den avsedda användaren är en person med mild till grav hörselnedsättning som behöver ljudförstärkning.

Funktionsbeskrivning

Audio-produktfamiljen består av flera förstärkare och sändare som har utvecklats speciellt för att ge ljudförstärkning även i krävande situationer. Beroende på vilken funktion som tilldelats den specifika förstärkaren eller sändaren kan olika mikrofoner användas för att fånga upp direktljud eller förstärka omgivningens ljudet.

 Den här enheten återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte hörselnedsättning eller dövhet som beror på organiska orsaker.

Så här kommer du igång

Använd Microset för diskret lyssning. Placera Mino i innerfickan eller med hjälp av en bältesklämma, sätt öronsnäckan i örat och använd kavajmikrofonen för att fånga upp ljudet.



OBES: För optimal prestanda ska du fästa kavajmikrofonen minst 30cm från halsen. Det är helt normalt att din egen röst också förstärks.

Allmänna varningar

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll denna broschyr för framtida bruk. Om du bara installerar enheten måste denna broschyr ges till hushållsägaren.

Varningar för faror

- Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan leda till brand, elektriska stötar eller andra personskador eller skador på enheten eller annan egendom.
- Förvara enheten oåtkomligt för barn under 3 år.
- Använd eller förvara inte enheten i närheten av värmekällor som öppen eld, element, ugnar eller andra enheter som alstrar värme.
- Ta inte isär enheten, det finns risk för elektriska stötar. Om enheten manipuleras eller demonteras upphör garantin att gälla.
- Den här enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt inte enheten för fukt.
- Skydda enheten från stötar under förvaring och transport.
- Skydda kablarna från alla potentiella skadekällor.
- Gör inga ändringar eller modifiering på denna enhet. Använd endast originaltillbehör från Bellman & Symfon för att undvika elektriska stötar.
- Den anslutna lyssningsenheten har en mycket kraftfull förstärkare och ljudnivån kan orsaka obehag eller i allvarliga fall skada hörseln om enheten används ovarsamt. Sänk alltid volymen till en låg nivå innan du sätter på dig ditt Microset!

Information om produktsäkerhet

- Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till skador på enheten och göra garantin ogiltig.
- Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- Enheten får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Om du stöter på andra problem med din enhet ska du kontakta inköpsstället, ditt lokala Bellman & Symfon-kontor eller tillverkaren. Besök bellman.com för kontaktinformation.
- Tappa inte enheten. Om du tappar den på en hård yta kan den skadas.
- Om en allvarlig incident inträffar i samband med den här enheten ska du kontakta tillverkaren och berörda myndigheter.

Driftsförhållanden

Använd enheten i en torr miljö inom de temperatur- och fuktighetsgränser som anges i den här broschyren. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt ska den inte längre betraktas som tillförlitlig och bör därför bytas ut.

Rengöring

Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik att få in fukt i öppningar. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel. Denna enhet kräver inte sterilisering.

Service och support

Om enheten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska ska du följa anvisningarna i användarhandboken och den här broschyren. Om produkten fortfarande inte fungerar som avsett kontaktar du din lokala audionom för information om service och garanti.

Garantivillkor

Bellman & Symfon garanterar denna produkt i 90 dagar från inköpsdatum mot eventuella defekter som beror på felaktigt material eller utförande. Denna garanti gäller endast under normala användnings- och serviceförhållanden och omfattar inte skador till följd av olyckshändelse, försummelse, felaktig användning, obehörig demontering eller kontaminering, oavsett orsak. Denna garanti omfattar inte oförutsedda skador eller följdskador. Garantin omfattar inte heller naturkatastrofer som brand, översvämning, orkaner och tornados.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på territorium. Vissa länder eller jurisdiktioner tillåter inte begränsningar eller uteslutning av tillfälliga skador eller följdskador, eller begränsningar av hur länge en underförtädd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti är ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter som konsument. Ovanstående garanti får inte ändras annat än skriftligen och undertecknat av båda parter.

Symbolförklaring

	Anger att enheten är en medicinteknisk enhet.
	Anger en bärare som innehåller information om unik identifiering av enheten.
	Anger att produkten inte får kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.
	Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.
	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska enheten kan identifieras.
	Anger tillverkaren av den medicintekniska enheten.
	Denna symbol anger att användaren bör läsa bruksanvisningen.
	Denna symbol anger att försiktighet är nödvändig vid användning av enheten eller kontrollenheten i närheten av där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att operatören är medveten om eller vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.
	Att identifiera en plats där information kan hittas, särskilt i en nödsituation.
	Anger de temperaturgränser som den medicintekniska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.
	Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten kan exponeras för på ett säkert sätt.

Information om överensstämmelse

Härmed försäkrar Bellman & Symfon att denna produkt i Europa överensstämmer med de väsentliga kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfons webbplats **bellman.com**.

Tekniska specifikationer

Vikt	17 g
Kabellängd	95 cm
Anslutning	3,5 mm stereokontakt
Färg	Svart

Specifikationer för hörlurar

Känslighet	113(± 3) dB/mW (@ 1kHz)
Frekvensåtergivning	50 Hz - 20 kHz
Maximal effekt	10 mW
Impedans	32 Ω

Specifikationer för mikrofon

Typ av mikrofon	Elektret-kondensatormikrofon
Direktivitet	Rundstrålande
Känslighet	-47 (±3) dB1
Frekvensåtergivning	110 Hz till 16 kHz
S/N-förhållande	>58 dB
Bias-spänning	Max. 10 VDC
Konfiguration	Detta headset kan konfigureras med följande personliga förstärkare: BE2030-C Mino Samtalsförstärkare
Driftförhållanden	Temperatur: 0 till 35 °C Luftfuktighet: 15% – 90%, icke-kondenserande
I lådan	BE9129-P02 Mikroset

 För detaljerad produktinformation, se motsvarande användarhandbok.

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warrington,
Peterborough, PE8 6UT, UK



CH

REP

Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland


Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone: +46 31 68 28 20
E-mail: info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE9129_019MAN1.0
Date of issue: 2025-03-20
© 2025 Bellman & Symfon AB.
All rights reserved.