


Visit Dörrsändare

BE1411-868

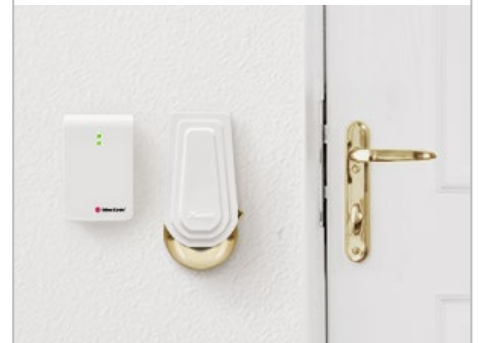

Egenskaper

Flexibel

Klarar dörrklocka och porttelefon

Tillförlitlig detektering

Digital fingeravtrycksalgoritm

Programmerbar

Lär sig känna igen din dörrklocka

Lång batteritid

Upp till 10 års batterilivslängd

Säker radiolänk

Upp till 250 m räckvidd

MD

CE-märkt medicinsk enhet
enligt EU MDR 2017/745

Missa inga besök

Visit dörrsändare är en produkt som ingår i Bellman & Symfons lösningar för smarta hem. Den talar om när gästerna står vid dörren, så att du enkelt kan hålla reda på vilka som kommer och går i hemmet. Dörrsändaren är förprogrammerad att känna igen de flesta dörrklockor och porttelefoner och kan lära sig att känna igen praktiskt taget vilken dörrsignal som helst.

Så fungerar det

När någon ringer på, skickar dörrsändaren en signal till Visitmottagaren som visar med ljud, blixtljus eller vibrationer att gästerna har kommit.

Flexibel detektering

Visit dörrsändare kan aktiveras genom:

- Den interna mikrofonen
- Den inbyggda magnetiska detektorn
- Det externa mikrofontillbehöret
- En galvaniskt ansluten dörrklocka

Visit dörrsändare använder digital fingeravtrycksalgoritm för ljudanalys och en säker radiolänk med lång räckvidd. Den är mycket enkelt att installera, praktiskt taget underhållsfri och har en batterilivslängd på upp till tio år.




Teknisk information

Mått och vikt

Höjd:	100 mm
Bredd:	65 mm
Djup:	27 mm
Vikt:	120 g inkl. batterier



Knappar och anslutningar

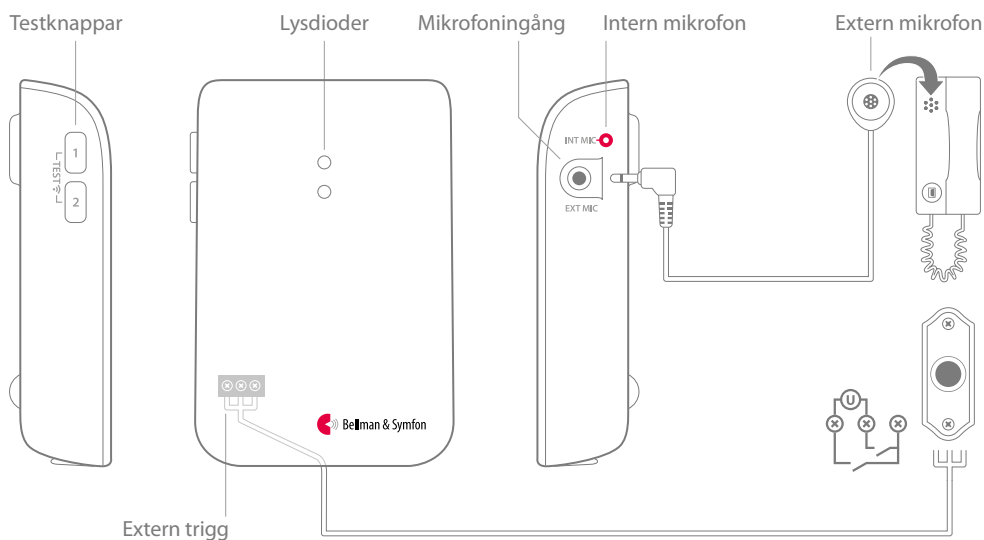

Anslutningar

- Mikrofoningång (3,5 mm monokontakt)
- Extern trigg för galvanisk anslutning

Aktivering

- Testknappar
- Intern mikrofon
- Extern mikrofon (tillbehör)
- Magnetisk detektion
- Befintlig dörrklocka ansluten till extern trigg

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Godkännanden



Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

Ström och batteri

- Strömförsörjning
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkaliskt
- Strömförbrukning
Aktiv < 70 mA, Viloläge < 15 µA
- Drifttid
Alkaliskt batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år

Antal radionycklar

- 64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Ej för återanvändning

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15 % -90 %
(ej kondenserande)

I paketet

- BE1411-868 Visit Dörrsändare
- 2 x 1.5V AA Alkaliska batterier
- Kardborreband för väggmontage
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning



Tillbehör

- BE9199-P02 Extern mikrofon 2.5 m

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1411-868_001DSH1.0_SE

bellman.com